



- ✓ Gumb Boost (ojačitev) med popadki
- ✓ Merilnik časa med popadki
- ✓ Prednastavljeni načini
- ✓ Optimax tehnologija
- ✓ Priporočajo ga babice

# ELLE TENS 2

Bolečine Brez Zdravil Pri Porodu In Po Porodu

*Babycare TENS*



## ELLE TENS 2



## ELLE TENS 2

- ✓ Uporablja 4 velike nosečniške blazinice
- ✓ Prednastavljeni načini za lažjo uporabo
- ✓ Vgrajen Boost gumb (ojačitev)
- ✓ Opti-max tehnologija za dodatno impulzno moč
- ✓ Merilnik trajanja popadkov
- ✓ Velik LCD osvetljen s samodejno osvetlitvijo ozadja
- ✓ Lahko se uporablja za lajšanje poporodnih bolečin
- ✓ Priložene baterije in vodniki (žice)

### body clock

Babycare TENS is part of the Body Clock group of companies

**Body Clock Health Care Ltd**  
108 George Lane, South Woodford,  
London E18 1AD England.  
www.babycaretens.com

**EC REP MedEnvoy Global B.V. Prinses**  
Pr. Margrietplantsoen  
33, Suite 123, 2595 AM Den Haag,  
Netherlands



### TENS LAJŠA BOLEČINE BREZ ZDRAVIL PRI PORODU IN PO PORODU

#### Kaj je TENS?

TENS je transkutana električna živčna stimulacija. S pomočjo lepilnih elektrodnih blazinic, se impulzi prenašajo po koži, da zmanjšajo občutek bolečine.

#### Kako deluje Elle TENS 2?

Ob začetku poroda, namestite 4 blazinice na hrbet, kot je prikazano v priloženih navodilih, in vklopite Elle TENS 2 enoto. Občutili boste prijetno utripanje. To bo pomagalo povečati vaše lastne kemikalije za lajšanje bolečin, znane kot endorfini. Ko doživite popadke, preprosto pritisnite gumb Boost za dodaten val moči, ki je potreben za boj proti bolečini. Ko se popadki končajo, znova pritisnite gumb Boost in ponovno zaženite cikel.

#### Kaj je tehnologija Opti-max?

Tehnologija Opti-max zagotavlja dodatno rezervo moči, ko jo zares potrebujete. Najpogosteje se uporablja v zadnjih fazah poroda, ko ste pripravljeni na porod in potrebujete dodatno moč pulza. Lahko se tudi uporablja kadarkoli, odvisno od vaših želja.

### O ELLE TENS 2

Vrhunski porodni TENS. Opremljen z nagrajenimi ključnimi funkcijami Elle TENS, vključno z najnovejšo tehnologijo Opti-Max, vnaprej nastavljenimi načini in Boost gumbom za povečanje moči. Poleg tega se Elle TENS 2 ponaša s časovnikom kontrakcij, osvetlitvijo ozadja in novim uporabniškim vmesnikom, ki nudi lajšanje bolečin med porodom in po njem.

#### Pogosta vprašanja o Elle TENS 2

##### Ali lahko za porod uporabim običajno enoto TENS?

Ne, Elle TENS 2 je zasnovan posebej za porod. Uporablja večje blazinice in vključuje gumb za povečanje, ki se uporablja pri popadkih.

##### Ali je Elle TENS 2 varen?

Da, zasnovan je za porod. Vendar ga ne uporabljajte pred 37. tednom nosečnosti. Preberite druge kontraindikacije na strani škatle.

##### Ali se lahko Elle TENS 2 uporablja z drugimi metodami za lajšanje bolečin?

Da, v povezavi s plinom in zrakom ali petidinom. TENS ni mogoče uporabljati v vodi.


##### Ali se lahko Elle TENS 2 uporablja v bolnišnici?

Da, vendar ga boste morda morali začasno izklopiti, če to od vas zahteva babica.

##### Ali lahko uporabljam Elle TENS 2 po rojstvu?

Ja, Elle TENS 2 lahko uporabljate pri bolečinah v hrbtu, ramenih in mnogih drugih bolečih stanjih.

Delovno okolje	Temperatura 0-40°C Vlažnost zraka 30-75% Zračni tlak 700hPa-1060hPa
Okolje za shranjevanje in transport	Temperatura 0-40°C Vlažnost zraka 30-90% Zračni tlak 700hPa-1060hPa

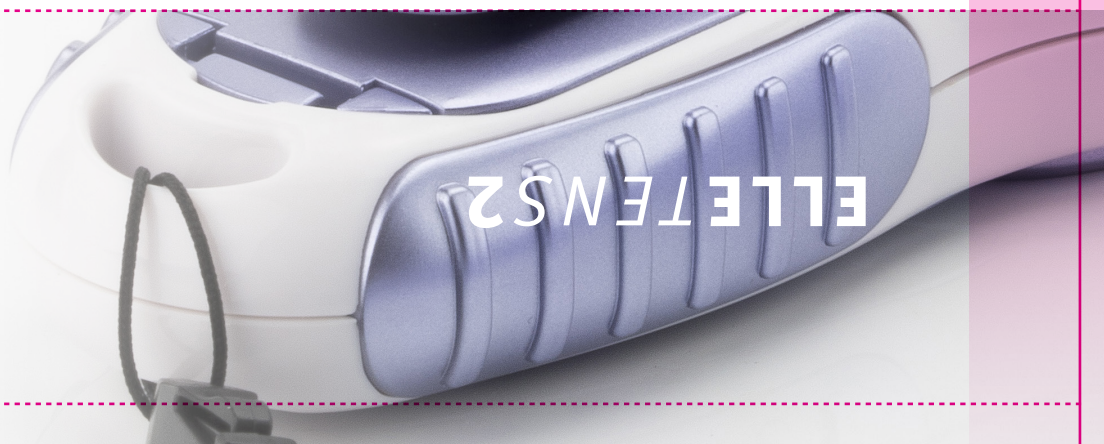

Mar 2024 (1)  
ELLE2-BDK-15Z  
Model: D-BC18T