


nosiboo^{*}pro2

electric nasal aspirator

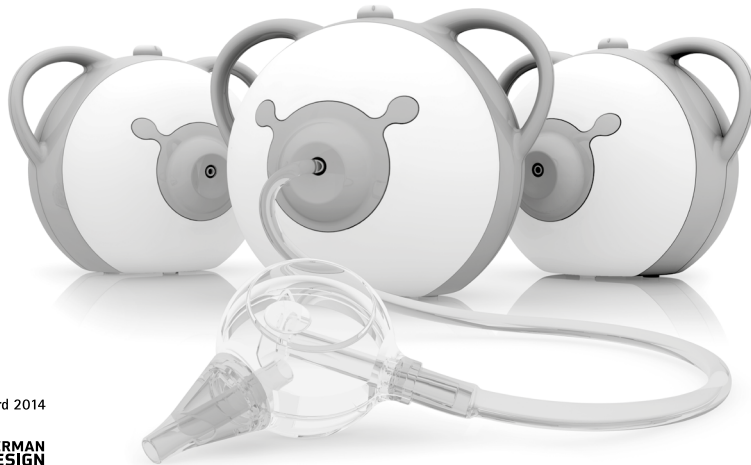

reddot award 2014
winner



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016

Safety instructions



nosiboo^{*} pro2

electric nasal aspirator



SLV

Varnostna navodila

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za nakup električnega nosnega aspiratorja Nosiboo Pro2. Upoštevajte navodila, ki so priložena napravi. Da bi nosni aspirator kar najbolje izkoristili, preberite tudi Hitri vodnik. Priporočamo, da za več informacij preberete uporabniški priročnik:



Attract Kft. je proizvajalec medicinskih pripomočkov s certifikatom ISO 13485. Ta izdelek je zapuščina MDD (MDD Legacy Device).

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

Te dokumente shranite, saj jih boste morda želeli ponovno prebrati.

Pred uporabo naprave natančno preberite vsa navodila.

Garancija bo veljavna le, če boste napravo uporabljali za predviden namen in na njej ne bo znakov poškodb.

Nosiboo Pro2 je higienski medicinski pripomoček. Pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavljate le, če je naprava nepoškodovana in če je zaščitna folija na nastavku za nos cela. Zaradi higienskih razlogov vam kupnine za izdelek ne moremo vrniti, če je folija odprta.

Varnostna navodila



Deli pripomočka v stiku z bolnikom tipa BF (izboljšana zaščita pred električnim udarom)



Dvojna izolacija



Medicinski pripomoček razreda IIa



Ime in naslov proizvajalca



Preberite uporabniški priročnik



Samo za domačo uporabo



GTIN - Globalna trgovinska identifikacijska številka (UDI-DI)



Serijska številka (številka proizvodnje)



Številka artikla (številka tipa)



LOT številka (identifikacijska številka proizvodnje)



Hranite na suhem mestu



Ohlšje preprečuje, da bi v napravo prišli trdni delci, večji od 12,5 mm, vendar pa ne ščiti pred pronicanjem tekočin.



Nevaren odpadek

Splošna uporaba

Uporabljajte le v skladu z navodili. Napačna uporaba lahko povzroči nevarnosti!

Napravo lahko uporabljajo le odrasli.

Nosnega aspiratorja ne uporabljajte za izpiranje nosu!

Če pride do nepričakovane okvare ali nepravilnega delovanja, napravo takoj izklopite.

Ne pustite otrokom, da bi se igrali z napravo, saj NI IGRACA. (Otrok bi si lahko kabel polnilnika zlahka ovil okrog vratu.)

Naprave ne puščajte brez nadzora v bližini otrok.

Naprave ne uporabljajte v kopalnici ali katerem koli drugem vlažnem ali mokrem okolju.

Ne dotikajte se napajalnega kabla ali kovinskih delov naprave z mokrimi rokami. Med uporabo naprave ne smete prekriti odprtini na zadnji strani.

Naprava je namenjena le za odstranjevanje sluzi iz otrokovega nosu. Ne uporabljajte je za noben drug namen.

Napravo in njene dodatke shranjujte nedosegljive otrokom.

Pred uporabo naprave se prepričajte, da so vsi deli pravilno pritrjeni.

Ne uporabljajte naprave brez filtra.

Prepričajte se, da ohišje, sesalna cev in glava Colibri niso poškodovani ali razpokani.

Napravo uporabljajte le z glavo Colibri, ki jo zagotavlja proizvajalec.

Del glave Colibri, ki je pritrjen na sesalno cev, mora biti med uporabo obrnjen navzdol.

Med uporabo ne obračajte glave Colibri navzdol.

Čiščenje, vzdrževanje in shranjevanje

Napravo hranite stran od virov toplote (npr. peč, grelnik ali konvektor), saj lahko poškodujejo izolacijo.

Na napajalnem kablu in sesalni cevi ne zavežite vola.

Da bi se izognili poškodbam, na kabel ne postavljajte težkih predmetov.

Poškodovan električni kabel lahko povzroči električni udar.

Ne uporabljajte napajalnega kabla ali aparata, če je poškodovan ali razpokan. Pritrdilnih vijakov ne smete odstraniti iz ohišja. Naprave ne smete predelati za uporabo v druge namene. To je lahko smrtno nevarno.

Ko razstavite glavo Colibri, da bi jo očistili, delov ne puščajte tam, kjer jih otroci lahko dosežejo. Otroci lahko majhne dele zgrizejo ali pogoltnjejo.

Ohišja in napajalnega kabla ne smete umivati z vodo ali katero koli drugo tekočino. Naprave se ne smete dotikati z mokrimi rokami. To lahko povzroči električni udar ali nepravilno delovanje.

Po končanem polnjenju naprave napajalni kabel vedno izključite iz vtičnice.

Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu. Zaščitite jo pred neposredno sončno svetlobo in toploto.

Električno napajanje

Napravo uporabljajte le s kablom, ki ga zagotavlja proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko obstaja nevarnost požara. Prepričajte se, da je kabel združljiv z vašo električno vtičnico.

Napravo lahko priključite na električno omrežje ali lahko izklopite iz omrežja le, če je upravljalni gumb v položaju OFF, torej je naprava izključena.

Pomembne informacije o napravi

Naprave Nosiboo Pro2 so opremljene z notranjim napajalnikom, ki ustvarja enosmerno napetost.

Poseganje v ohišje je prepovedano in življenjsko nevarno!

Tehnični podatki

Maksimalna moč motorja: 60 W

Nastavljiva moč motorja: 10-60W

Razpon diferenčnega tlaka: 0,04-0,08 bara

Nastavljiv dovod zraka: 21-42 l/min

Napajanje: 100-240 V 50/60 Hz

Razred IP: IP21

Razred zaščite: II

Tip delov na dotik: BF

Deli na dotik: celotno ohišje

Vrsta delovanja: brez neprekinjenega delovanja

Čas delovanja: priporočeno med 0,5 in 1,5 minute (Naprava se po 15 minutni uporabi samodejno izključi)

Meja izklopa toplotne zaščite: 80 °C

Povprečna temperatura ohišja: 30-35 °C po 1 minuti neprekinjene uporabe

Raven hrupa: 52 -62 dB

Območje delovne temperature: od -10 °C do +40 °C

Relativna vlažnost; uporaba: največ 85 %.

Temperatura skladiščenja in prevoza: od -10 °C do +85 °C.

Skladiščenje, transportna vlažnost: 10-65 %

Pričakovana življenjska doba ohišja (električnih delov): 3 leta

Pričakovana življenjska doba glave Colibri: 3 mesece

Masa (ohišje): 750 g

Dimenzije (ohišje, Š × V × G): 200 x 155 x 175 mm

Dimenzije (celoten paket, Š × V × G): 180 x 180 x 225 mm

MD Category: II.a

NBOG: MD1102

MDD/MDR: MDD Legacy Device

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

Proizvajalec ni odgovoren za okvare izdelkov iz neodobrenih uvoznih virov!

Kontakt

Kontaktni podatki proizvajalca.

Attract Kft.

H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1., Madžarska

Tel.: +36 72 551 642 (pon.-pet.: 8.00-16.00)

E-pošta: customerservice@nosiboo.com

PRRC (odgovoren za zagotavljanje kakovosti in skladnosti pri proizvodnji in distribuciji medicinskih pripomočkov):

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
Attract Kft. - Vodja upravljanja kakovosti

H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1., Madžarska

Tel.: +36 72 551 642 (pon.-pet.: 8.00-16.00)

E-pošta: quality@nosiboo.com

Priporočamo, da za več informacij preberete tudi uporabniški priročnik in hitri vodnik Quick Guide (Prvi korak).



nosiboo[®]**pro2**
electric nasal aspirator

www.nosiboo.eu